

赤ちゃん用身長計測マット

4995-02

2007年8月13日発行

赤ちゃんの身長が正確に計れる丈夫なマットです。

使用しないときは丸めておけるので、収納スペースをとりません。壁に掛けておくこともできます。

[仕様]

大きさ: 300(W) × 140(H) × 1340(D)mm


重さ: 約 500g

測定範囲: 100~990mm

最小目盛り: 5mm

保管温度: 10~40℃

表面ビニルコート

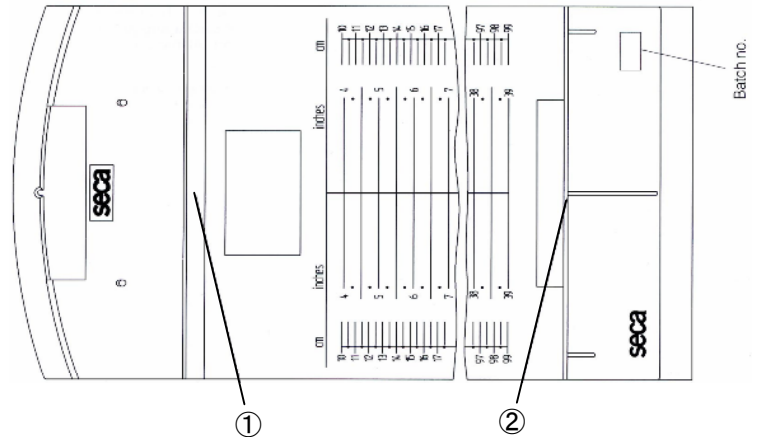

[測定方法]

1. 計測マットを図のように横におきます。
2. 赤ちゃんをマットの上に寝かせ、頭部を①の板に当てます。
3. 左手で赤ちゃんを動かないように押さえたまま、右手で②の板を赤ちゃんの足に当てます。
4. 赤ちゃんの膝を左手で優しく押して、足を伸ばします。
5. 右手で②を赤ちゃんのかかとの位置に合わせます。
6. マットの目盛りで赤ちゃんの身長を測ります。

[お手入れ方法]

市販の洗剤、消毒剤をお使いいただけます。

[使用上の注意]

赤ちゃんをマットの上に寝かせたまま目を離さないで下さい。
赤ちゃんが転がり落ちない水平なところで測定して下さい。
定期的に洗浄、消毒して下さい。
正確に測定するために、2人で作業されることをお勧めします。

輸入販売元: フィード株式会社 〒220-6119 横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワー

お問合せ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話: 0120-00-4502 FAX: 0120-00-4506

ご注文は

電話: 0120-00-4503 FAX: 0120-00-4506