

血液の採取に必要な工夫を、 さまざまに凝らした形状です。

デリケートな血液の採取で、医療現場の方に負担をかけない
いくつもの工夫を凝らしました。

ワンクリックで開けられ、採取しやすい。

血液の漏れを防ぎやすく、血液に触れにくくする形状。

ずっと血液の採取容器に携わってきたテルモからの提案です。



大きく、採取しやすい
採取口

血液を漏れにくくする
管口部の溝

血液の付着を防ぐ
本体リブ

片手でカンタンに開けられる
ワンクリックキャップ



見やすい
採取予定量ライン

自立できる形状

使用方法

キャップを取り外す

- 1 キャップを保持して軽く上向きに力を加えてください。

※キャップの落下にご注意ください。
※スクリュー式ではないので、
キャップを廻すと空回りします。



ワンクリックで開栓



- 2 そのまま、まっすぐキャップを取り外します。

血液を採取する

- 3 採取口から内壁を沿うように採取予定量ラインまで血液を採取してください。



キャップを閉める

- 4 外しておいたキャップを、まっすぐにカチッと音がするまで押し込んでください。

※適切に再栓されなかった場合、血液が漏れる可能性があります。



転倒混和する

- 5 血液採取後、すぐにゆっくりと8~10回の転倒混和を行ってください。

※激しく混和すると、泡立ちや溶血のおそれがあります。

- 6 凝固促進剤入りの場合は、血液採取後30分静置した後、採取後2時間以内に遠心分離してください。

※遠心推奨条件: 3000G×10分

