

## 〈概要〉

■ 製品の特長 : もともと歯科医療用に開発された Op-d-op フェイスシールドは :

1. 防護性
2. つけ心地
3. 視界の良しさ
4. 便利さ
5. スタイル


を求めるさまざまな医療分野の関係者に使用されています。




### ⚠ 注意

- この製品は、全ての病気や細菌を防ぐことができるわけではありません。Op-d-op 製品は単に体液がはねて、使用者の目、鼻、口などに入る危険性を軽減するためのものです。使用後は、適切な方法で殺菌、または廃棄して下さい。
- Op-d-op バイザーシールドは、医療の目的でのみ使用して下さい。戸外で、医療以外の目的で使用することは控えて下さい。

## シールドの取り付け方

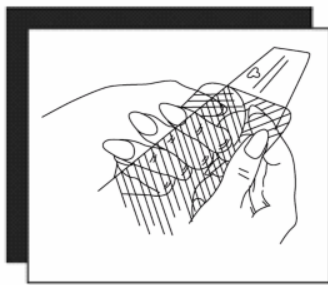


1. シールドの両面に防護フィルムが貼ってあるので、剥がしてください。

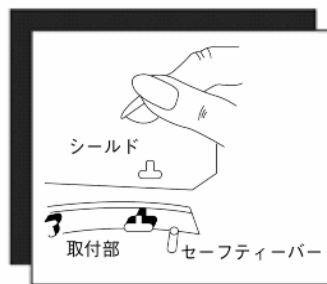

2. シールドの取付孔とその取付部の位置関係を確認して下さい。


☐ = "P"マーク  
☒ = "OP"マーク

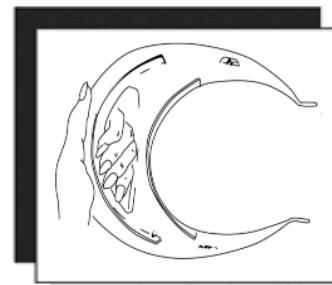


3. 左手で図のようにバイザーを逆さまに持ちます。指は通風孔を通します。



4. 右手でシールドを図のように曲げて持ちます。

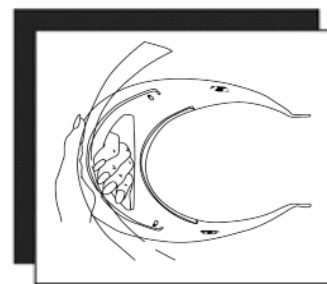


5. シールド中央の取付孔を取付部の"P"マークに押し込んでください。

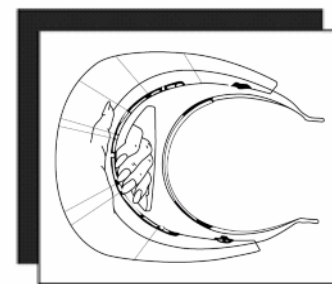


6. 次にセーフティバーと"OP"マークの間にシールドを差し入れ(テンポラリー/オールディタイプ)、取付孔を4箇所の"OP"マークに順に押し込んでください。

## ミニシールドの取り付け方


ミニシールドは、通風孔用のバリアです。ミニシールドは、フェイスシールド(前面のシールド)を取り付けた後で取り付けて下さい。

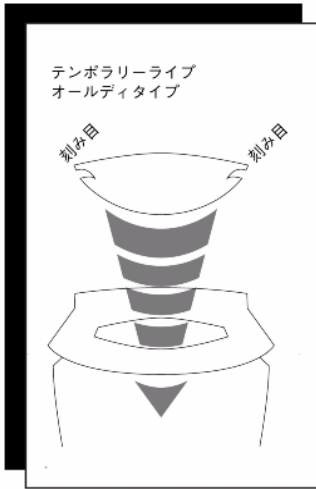


1. シールドの刻み目をバイザーの取付部に差し込みます。

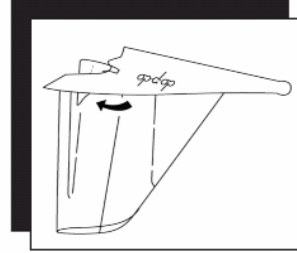

2. 上の図は、この時点で、ミニシールドがどうなっているか側面から見たところです。

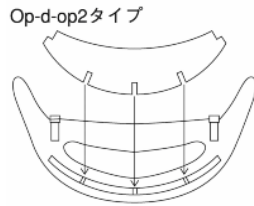

Op-d-op2タイプ

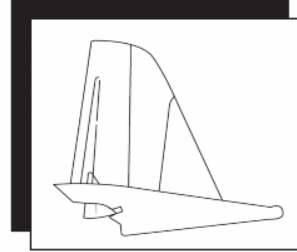

3. バイザーとシールドを逆さまにします。



4. 親指でミニシールドの底を 'P' マークの下に押し込んで下さい。カチッという音がしてロックされます。




5. Op-d-op バイザーシールドは左図のように装着されます。シールドと顔が平行になり、顎とシールドの間に指が2、3本入るくらいが目安です。

## バイザーのサイズ調節

⚠ オールディタイプは調節できません。



1. バイザーを大きくしたり、小さくするには、加工する必要があります。フォームバンパー、ミニシールドとフェイスシールドを外し、後でまた使うために取っておきます。

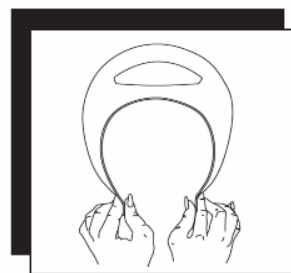


2. バイザーを小さくするには：バイザーを25～35秒間沸騰したお湯に入れた後、お湯から出し、平らな場所に置きます。バイザー・アームの端と端を曲げて近づけます。急速に温度を下げる場合は、送風して下さい。

必要に応じて、この手順を繰り返すことができますが、バイザーが完全に冷めてから行って下さい。



バイザーを大きくするには：バイザーを25～35秒間、沸騰したお湯のなかに入れた後、お湯から出し、アームが均一に平らにでき、急速に乾かすことのできるような平たんな場所に置きます。熱は感じるが、熱すぎない程度になったらバイザーをかぶります。バイザーが冷めるにつれて、あなたの頭の形に合っていきます。

必要に応じて、この手順を繰り返すことができますが、バイザーが完全に冷めてから行って下さい。

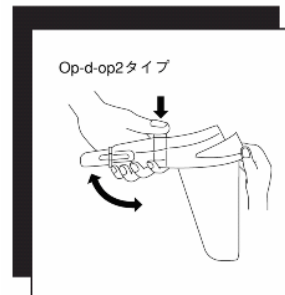

ボタンを押しながらサイズを調節します。

## 〈シールドの手入れ方法〉


もしシールドが非常に汚れた場合、最もお勧めするのは汚染されたシールドを正しい方法で廃棄し、新しいものに取り替えることです。もしシールドを再利用するのなら流水で、殺菌用石鹼(Hibiclens, Sporidicin, Bactoshield など)を使って、きれいに濯いで下さい。シールドについた水滴はティッシュペーパーもしくは柔らかい消毒済みのタオルで拭いて下さい。シールドをペーパータオルでこすらないで下さい。シールドに傷が付く恐れがあります。

## シールドはオートクレーブできません。

滅菌が必要な場合は薬液滅菌をして下さい。

## 〈シールドの調節方法〉

もし、Op-d-op バイザーシールドの使用時、シールドが肩や胸に触れる場合は、はさみで短くすることができます。

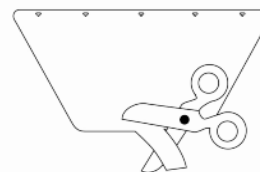

### フェイスシールドのパイオニア、Op-d-op 社のバイザーシールドは医療従事者を守ります。

- Op-d-op 医療用バイザーシールドは
- ◆くもらない！
  - ◆優れた視界！ ・歪みません。 ・ぼやけません。  
・消耗品もお求めやすくなっております。
  - ◆マスクやゴーグル、メガネの上からでも素早く簡単に装着できます。
  - ◆脱着が簡単！

製造元：Op-d-op (アメリカ)

輸入販売元：フィード株式会社  
〒220-6119  
横浜市西区みなとみらい2-3-3  
クイーンズタワー

この製品に関するお問い合わせは

お問い合わせ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話：0120-004-502

FAX：0120-004-506

ご注文は

電話：0120-004-503

FAX：0120-004-506

# バイザーシールド