

〈使用方法〉

シールドに傷を付けないように注意して取り扱って下さい。
シールドとフレームに、名前やマークを付けるのも良いでしょう。

1. PRO-TEX フェイスシールドを箱から取り出し、両面の保護シートを剥がして捨ててください。
シート端に沿って指で押せば、シートは剥がれます。
2. 付属のクリップをチェックし、シールドにしっかり押しつけます。
クリップが緩くなったら、シールドは新しい物と交換してください。
3. 眼鏡のつる又は PRO-TEX のサポートフレーム(別売)にクリップを取り付けて下さい。
4. つる又はフレームの角から約 25mm のところにクリップして下さい。
5. 鏡を見ながら、クリップを少しゆるめて左右均等に少しずらして、シールドと鼻との間隔を調整して下さい。
間隔は 12mm 位が適当です。マスクを使用する場合はシールドの顎の方を少し前後に調節し、斜めにして換気を良くします。
6. シールドの平らなところに直接置くと、傷つけることがあります。シールドに傷を付けないよう注意してください。
7. シールドは衛生上 2~4 週間で交換して下さい。汚れた時、傷が付いた時、クリップが緩くなった時も、交換して下さい。
誤使用を防ぐため、捨てる時は、折るか、切断して捨てして下さい。
8. 前へかがんだ時、シールドを取り付けた眼鏡やフレームが鼻からずり落ちないように固定用紐を使用してもかまいません。

〈清掃〉

シールドは、ラテックスグラブをはめて、石鹼を溶かした温水で洗うことができます。こうすればシールドに傷を付けません。
各医院の安全基準に従って、洗うか捨てるか、決めて下さい。洗った時は、乾燥したシールドを、眼鏡又はフレームに取り付けて使用して下さい。



重要

PRO-TEX のディスポーザブルフェイスシールドは、軽量で、体液、スプレー、飛沫が直接かからないようにする二次的な防護具です。歯科や一般医療のような、簡易な用途に適しています。衝撃に耐える設計ではありません。
また ANSI Z 87.1 の防護具(必要な場合は安全眼鏡やゴーグルも含まれます)に代わる物ではありません。

製造元 : Pro-Tex (アメリカ)

輸入販売元 : フィード株式会社
〒220-6119
横浜市西区みなとみらい2-3-3
クイーンズタワー

この製品に関するお問い合わせは

お問い合わせ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話 : 0120-004-502

FAX : 0120-004-506

ご注文は

電話 : 0120-004-503

FAX : 0120-004-506